

ウチエのベッド用品

uchie
おもいやりをかたちに


あらえ～る14 マットレス ご使用のしおり

品番：BB-2006

このたびは、弊社の『あらえ～る14 マットレス』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・本書は必ず保管しておいてください。
- ・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡してください。
- ・お買い上げのマットレスは改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

各部名称

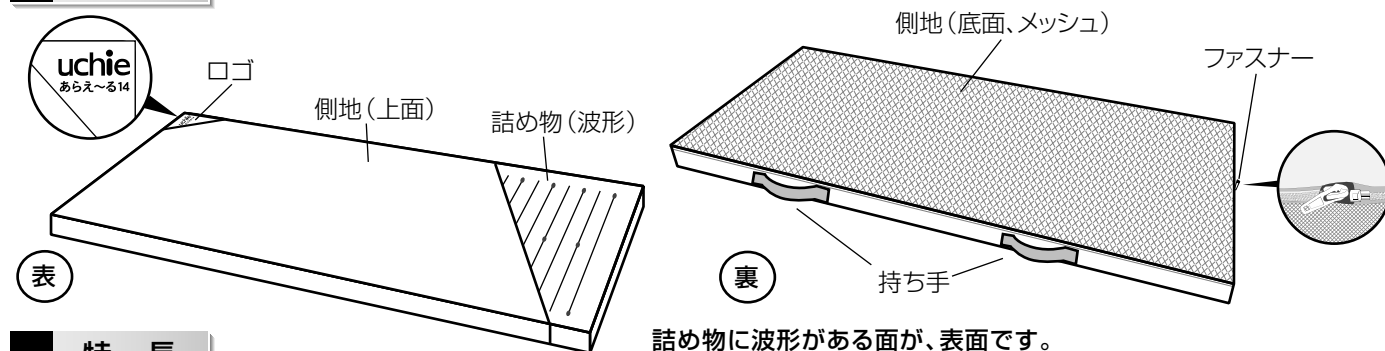

特長

- ・マットレスが汚れても、すぐに、簡単に丸ごと洗えますので、ニオイが付きにくく、いつでも清潔にお使いいただけます。
- ・詰め物は水が染み込みにくく、さっと洗い流すことができ、早く乾きます。
- ・ファスナーは裏側に取付け。側地が上下に分かれ、側地の取り外し、取り付けを簡単にすることができます。
- ・あたまとあし側の区別がなく、定期的に入れ替えて長くお使いいただけます。

仕様

品名	あらえ～る14 マットレス	材質	側地	上面:ポリエステル 63%
品番	BB-2006			:綿(オーガニックコットン) 37%
寸法	(幅)87×(長)186×(厚み)6cm		詰め物	底面:ポリエステル 100%
重量	約7kg			EVA 樹脂

お手入れの仕方

●詰め物

- ・中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジなどでやさしく洗浄してください。
- ・洗剤が残らないよう、十分にすすいでください。
- ・洗浄後は、風通しの良い日陰に、平らな状態で形を整えて干してください。
- ・詰め物が完全に乾いてから、波形の面を表にして側地に入れてファスナーを締めてください。

⚠注意

- ・機械洗浄(押し洗い、遠心力洗浄)はしないでください。
- ・塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。劣化、破損の原因となります。
- ・天日干しはしないでください。
- ・乾燥機の使用はお止めください。
- ・洗浄温度は60°以下にしてください。
- ・熱消毒はしないでください。変形、劣化するおそれがあります。

●側地(上面・底面)

- ・側地は取り外して洗えます。洗濯の際は、下記の洗濯表示を守ってください。



※上面は乾燥機使用不可
※底面は乾燥機(低温)使用可

⚠注意

- ・上面には蛍光剤配合洗剤を使用しないでください。
- ・柔軟剤を使用しないでください。
- ・洗濯後の側地は天日干しをせず、風通しの良い日陰に干してください。また、完全に乾燥しないと、カビが発生するおそれがあります。
- ・詰め物には、表裏があります。波形の面を表にしてください。

使用方法

- ・ベッドの上に直接敷いてお使いください。
- ・マットレスを持ち手までシーツで覆い、防水シーツ、ベッドパッドなどを敷いてお使いください。

⚠️ 注意

- ・持ち手をむき出しにしないでください。手や足などが引っかかってけがをするおそれや、ベッド操作時に持ち手が引っかかり、破損するおそれがあります。

保管について

- ・マットレスの上に重たいものを載せないでください。
- ・高温多湿のところや直射日光が当たるところは避けてください。
- ・マットレスを折りたたまないでください。変形・破損の原因になります。

⚠️ 安全上の注意事項 ※安全のため、必ずお守りください。

- 弊社以外のベッドには使用しないでください。
他社製品に使用すると、思わぬすきまが発生し、けがをするおそれがあります。また、マットレス本来の性能を活かしきれない場合があります。
- 乳幼児やお子様には使用しないでください。
ベッドやサイドレール、ベッド用グリップとマットレスとのすきまに頭、首、腕や足などがはさまり、けがをするおそれがあります。
- 持ち手をシーツなどで覆ってから使用してください。
持ち手がむき出しになると、手や足などが引っかかり、けがをするおそれがあります。また、ベッド操作時に持ち手が引っかかり、破損するおそれがあります。
- マットレスを裏返して使用しないでください。
詰め物にロゴがある面が、表面です。裏表を逆に使用しないでください。
- サイドレールやベッド用グリップとマットレスとのすきまに頭、首、腕や足などが入らないように注意してください。
頭、首、腕や足などが抜けなくなり、けがをするおそれがあります。
- マットレスを2枚以上重ねて使用したり、マットレスの上に敷布団などを敷かないでください。
ベッド操作中にずれてけがをしたり、転落するおそれがあります。また、マットレス上面からサイドレールやベッド用グリップ上端までの高さは、22cm以上確保してください。寝返りや体位変換時に転落するおそれがあります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
破損、変形するおそれがあります。
- マットレスに人が乗ったままの状態を移動させないでください。
人が乗ったまま移動させると、詰め物や側地が破損する原因となります。
- 側地の持ち手以外を持って移動させないでください。
移動する時は、持ち手を持って移動させてください。側地やファスナーが破損するおそれがあります。
- 詰め物を強く引っばったりつかんだりしないでください。
詰め物が破損するおそれがあります。
- 滑り落ちないように注意してください。
ベッドの端に座る場合は、滑り落ちないように介助者の方が体を支えるなどご注意ください。
- マットレスの上で飛び跳ねないでください。
けがや破損するおそれがあります。
- 側地をかならず付けた状態で使用してください。
側地を付けずに使用すると、詰め物が破損したり、摩擦が生じるおそれがあります。
- 側地のファスナーを締めてください。
側地のファスナーは必ず締めてご使用ください。
- マットレスのお手入れは、タグ表示を参照してください。
詰め物と側地は洗濯が出来ます。タグ表示に従って洗濯をしてください。
- お客様での修理や改造はしないでください。
思わぬけがや破損するおそれがあります。
- 火気、高温の近くで使用しないでください。
マットレスを火気に近づけないでください。火災や変形などの原因となります。

ウチワ株式会社 サービス係

本社／大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-8-29 TEL(06)6482-0230 FAX(06)6401-6372

関東営業所 〒271-0087 千葉県松戸市三矢小台4-12-3 TEL(047)362-0311 FAX(047)362-0312

福岡営業所 〒819-1107 福岡県糸島市波多江駅北4-6-5 TEL(092)323-4331 FAX(092)323-4332

兵庫工場 〒673-1334 兵庫県加東市吉井732-1

検査印

●常に皆様のご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。

14.06.300