

『シャワーラクリク』リニューアルのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、このたび弊社商品『シャワーラクリク』をリニューアル発売することとなりました。下記にて商品の詳細をご案内申し上げます。

是非とも貴社の販売製品の新しいアイテムとしてお加え頂き、各方面にご提案して頂きますようお願い申し上げます。

今後とも弊社商品を新商品も含めてご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

| 名称 | 品番 | 定価(税別) | JANCODE | TAISコード | 出荷日 |
|-----------------------------|---------|----------|---------------|--------------|----------------|
| シャワーラクリク(穴無し) | SRC-001 | ¥168,000 | 4519283003364 | 00129-000158 | 2017年 5月18日 |
| シャワーラクリク(U型) | SRC-003 | ¥166,000 | 4519283003548 | 00129-000165 | |
| シャワーラクリク (穴無し/ヘッドレストF付き) | SRC-005 | ¥195,000 | 4519283003937 | 00129-000190 | |
| シャワーラクリク (U型/ヘッドレストF付き) | SRC-006 | ¥193,000 | 4519283003944 | 00129-000191 | |

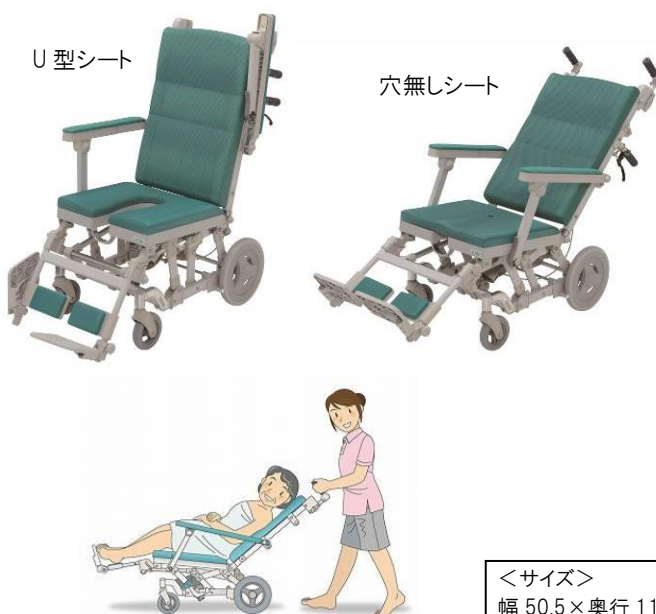

・油圧からガスシリンダーにリニューアルしました。リクライニングの操作が手元で出来るようになり、一連の流れが介助者が移動せずに行えます。リクライニングレバーは左右どちらにも設置できるので、介助者の使いやすい方で使用できます。

・ハンドル下のリクライニングレバーを握りながら、背もたれを倒します。背もたれは104°～136°の間で無段階に調整が可能です。

・リクライニングをすることで、座面にかかる体圧を分散させることができ、座位保持が困難な方の移動がラクになります。
※背と脚を個別に角度調整する事はできません。

・リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定します(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。

<サイズ>

幅 50.5×奥行 110(144)×高さ 100(88)cm、座幅(肘～肘)42×座奥行 40.5(43.5)cm
前座高 43.5(42)cm、前座から足台 41(37.5)cm ※()最大リクライニング時

今後ともより良い製品の開発に励み、皆様にご満足いただけるよう心掛ける所存でございます。

何卒倍旧のご愛顧を賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

貴社の益々のご隆盛を心よりお祈り申し上げます。

敬具